

歯科材料9 歯科用研削材料

一般医療機器 歯面研磨材 70904000

アドネスト<sup>®</sup> ファイン  
（仕上げ研磨材）  
ADONEST<sup>®</sup> FINE

【形状・構造及び原理等】

本品は、スケーリング後の歯面研磨、ブラケット装着前の歯面研磨、ルートプレーニング後の根面研磨等の仕上げ研磨に適した微粒子研磨成分を配合した、ノンフッ素タイプの仕上げ研磨材である。

\* 1. 構成

ペースト（内容量 50g）

外観・性状：淡紅色の粘稠なペーストで、わずかに芳香があり、味はやや甘く、清涼感がある。

組成：グリセリン、ケイソウ土、カルメロースナトリウム、酸化チタン、その他

2. 原理

研磨成分（ケイソウ土）が歯面の汚れを物理的に研磨する。

\*\* 3. 理工学的性質（試験方法は社内規格による）

項目	規格	実測値
粒度(メジアン径)	7±3 μm	6.9 μm
pH	6～10	7.7
使用性質(付着性)	塗布部位に付着する。	適合

【使用目的又は効果】

歯面の清掃及び研磨

【使用方法等】

\*\* 本品の適量を歯科予防治療用ブラシ、歯磨カップ等に塗布して研磨するか、応用部位に直接貼付して歯科予防治療用ブラシ、歯磨カップ等で研磨する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- \*\* (1) 歯科予防治療用ブラシ、歯磨カップ等に適した使用回転数範囲に注意して使用すること。
- (2) 必要に応じて本品の前に粒子の粗い研磨材（アドネスト コース等）を使用すること。[研磨がより効果的に行える。]

【使用上の注意】

\* 1. 重要な基本的注意

- (1) 本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- (2) 本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- (3) 万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

\* [保管方法]

室温で保管すること。

[使用期限]

外箱に表示

[記載の使用期限は、自己認証（当社データ）による。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：ネオ製薬工業株式会社

住所：〒150-0012 東京都渋谷区広尾 3-1-3

電話番号：03-3400-3768 Fax：03-3499-0613

フリーダイヤル：☎0120-07-3768

製造元：ネオ製薬工業株式会社

