

歯科材料3 義歯床材料
一般医療機器 歯科用分離材 70923000

セパライト

SEPALITE

【形状・構造及び原理等】

* 本品は、レジン系材料間の接着(重合)を防ぐ水溶性のペーストタイプの分離材である。

主に、レジン系材料で裏層された窩洞に対するレジン系仮封材や印象材の適用時に使用する。

** 1. 構成

ペースト(内容量 2g)

外観・性状: 白色のペーストで、わずかに特異なにおいがある。

組成: マクロゴール400、その他

** 2. 原理

レジン系材料間の界面に被膜を形成することにより、材料間の接着を防ぐ。

** 3. 理工学的性質

被膜の厚さ: 25 μm 以下

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: ネオ製薬工業株式会社

住所: 〒150-0012 東京都渋谷区広尾 3-1-3

電話番号: 03-3400-3768 Fax: 03-3499-0613

フリーダイヤル: ☎0120-07-3768

製造元: ネオ製薬工業株式会社

【使用目的又は効果】

* 歯科材料間の分離

【使用方法等】

* 適用部位に適量を塗布する。

【使用上の注意】

** 1. 重要な基本的注意

- (1) 本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- (2) 本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- (3) 万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

** [保管方法]

室温で保管すること。

[使用期限]

外箱に表示

[記載の使用期限は、自己認証(当社データ)による。]

