

歯科材料5 歯科用接着充填材料  
管理医療機器 歯科用知覚過敏抑制材料 70926000

# バーナル

VARNAL®

## 【形状・構造及び原理等】

- \*\* 1. 構成  
液（内容量 14g）  
外観・性状：淡黄色澄明な液  
組成：コーバル樹脂、その他
- \* 2. 原理  
乾燥することにより保護被膜を形成して、外来刺激を物理的に遮断する。

## 【使用目的又は効果】

- \* 象牙質又は形成象牙質の知覚過敏の抑制又は緩和

## 【使用方法等】

- \* 1. 通法により、患歯を清掃する。
- \* 2. 簡易防湿を施し、綿球等で清拭する。
- \* 3. 本品の適量を取り、綿球又はブラシ等を用いて患部に塗布し、乾燥させる。
- \* 4. 必要に応じて、上記の操作を繰り返す。

## 【使用上の注意】

- \*\* 1. 使用注意
  - (1) 歯髄に近い窩洞、あるいは露髄の場合には、覆髄剤（材）を用い、直接歯髄に塗布しないこと。
  - \* (2) 本品は、引火性なので火気に注意して使用すること。
- 2. 重要な基本的注意
  - \* (1) 本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
  - (2) 本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
  - (3) 本品は、口腔軟組織や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。  
付着した場合には、すぐにアルコール綿などで清拭した後、流水で洗浄すること。  
万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

## 【保管方法及び有効期間等】

- \*\* [保管方法]
  - \* 1. 引火性なので火気に注意して保管すること。
  - \* 2. 室温で保管すること。
- \* [使用期限]  
外箱及びラベルに表示  
[記載の使用期限は、自己認証（当社データ）による。]

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 1. 製造販売元：ネオ製薬工業株式会社  
住 所：〒150-0012 東京都渋谷区広尾 3-1-3  
電 話 番 号：03-3400-3768 Fax：03-3499-0613  
フリーダイヤル：☎ 0120-07-3768  
製 造 元：ネオ製薬工業株式会社
- 2. 外国製造業者：セティライト インダストリーズ インク  
(CETYLITE INDUSTRIES, INC.)  
国 名：米 国

