

歯科材料4 歯科用根管充填材料

管理医療機器 根管充填材用軟化材 70875000

ビタペックス[®] ソルベントVITAPEX[®] SOLVENT

【禁忌・禁止】

【適用対象（患者）】

本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

- (2) 本品は、口腔軟組織や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。
万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【形状・構造及び原理等】

- 構成
液（内容量 100mL）
外観・性状：無色～淡黄色澄明で、オレンジ様の芳香がある。
組成：*d*-リモネン、無水エタノール
- 原理
d-リモネンの油脂溶解作用による。

【使用目的又は効果】

根管充填材料ビタペックスの軟化・溶解、除去

【使用方法等】

本品の適量を根管内のビタペックス（医療機器承認番号：16300BZZ00918000）に滴下し、軟化させてリーマ等により除去する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 注入器を使用して滴下する場合には、なるべく側方噴出型の針を用い、強い圧が加わらないよう注意すること。
[根尖孔外へ溢出することがある。]
- 注入器を使用する場合には、ガラス製のものを用いること。[樹脂やゴムを侵すことがある。]
- プラスチック製品を使用する場合には、使用器具や容器が溶解しないか事前に確認すること。[樹脂やゴムを侵すことがある。]
- ラバーダムシート、ゴム手袋及び保護具等に付着した場合には、直ちに拭き取ること。[樹脂やゴムを侵すことがある。]
- 引火性があるため、火気に注意して使用すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 引火性があるため、火気に注意して保管すること。
- 室温で保管すること。

【使用期限】

外箱及びラベルに表示

[記載の使用期限は、自己認証（当社データ）による。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：ネオ製薬工業株式会社

住所：〒150-0012 東京都渋谷区広尾 3-1-3

電話番号：03-3400-3768 Fax：03-3499-0613

フリーダイヤル：☎ 0120-07-3768

製造元：ネオ製薬工業株式会社

