


歯科用洗浄液 セテイルサイド

濃縮液

本品は4級アンモニウム系界面活性剤を主成分とする優れた洗浄力と防錆効果を備えた歯科用器具類の洗浄液で、金属製品、ゴム及びプラスチック製品に応用でき、超音波洗浄用にも使用できます。

希釈液の作り方

- ・ボトルをゆっくり傾け、容器上部の計量器に必要な量の濃縮液をお取りください。
- ・希釈率に従った水の量に、計量した濃縮液を加えます。

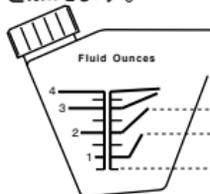

濃縮液	水の量
2 oz (60mL)	4 L
1 oz (30mL)	2 L
½ oz (15mL)	1 L

浸漬洗浄

- ・標準時間：15分

超音波洗浄

- ・2～5分

清拭の場合

- ・サニタイザー(専用スプレー容器)を使用するか、ガーゼ等の柔らかい布に浸して清拭してください。

組成	界面活性剤 イソプロピルアルコール 防錆剤(亜硝酸ナトリウム)
液性	弱アルカリ性
容量	32oz (946mL)

無リン

【注意】

- ・器具類は他の洗剤を十分洗い流してから浸漬してください。
- ・洗浄後の器具類は水洗いしてください。
- ・浸漬及び超音波洗浄後の器具類は、必要に応じて加熱滅菌等の適切な処置をしてください。
- ・耐食処理がされていないアルミ製品への使用は避けてください。
- ・変色のおそれがあるものは、目立たない部分で試してからお使いください。
- ・使用した希釈液はなるべく毎日交換してください。
- ・沈殿を生じることがありますが、使用には差し支えありません。

使用上の注意

- ・子供の手の届かないところに保管してください。
- ・洗浄液を取り扱う時はなるべくゴム手袋を使用してください。
- ・目又は皮膚に付着した場合はすぐに水で洗い流してください。万一飲み込んだ場合は水を飲ませる等の処置をし、必要に応じて専門の医師に相談してください。
- ・ボトルは密栓して、直射日光をさけて保管してください。

輸入発売元



ネオ製薬工業株式会社

〒150-0012 東京都渋谷区広尾3丁目1番3号
Tel. (03)3400-3788 Fax. (03)3499-0613

製造元



**CETYLITE
INDUSTRIES, INC**