

## 歯の救急保存液

# ティースキーパー「ネオ」

ケガにより歯が抜けてしまった場合には、その歯をティースキーパー「ネオ」に入れ、できるだけ早く歯科医院へ行き、適切な治療を受けてください。

歯の根の部分には、歯根膜とよばれる歯を支えている組織がありますが、この組織は乾燥に対して非常に弱く、口の外での生存は30分が限界とされています。しかし、歯根膜が生きていれば歯を元の位置に戻す（再植）ことにより、歯は再び機能を回復する可能性があります。ティースキーパー「ネオ」は再植までの間、歯根膜を乾燥から守り、生存させる環境を与えます。

### 【使い方】

1. ミシン目にそってフィルムをはがし、ふたを回して開ける。
2. 抜けた歯をそのまま容器の中に入れる。  
歯を持つ際には、歯の根の部分を持たないこと。
3. ふたをしっかりと閉め、すぐに歯科医院へ行く。  
状況カードに必要事項を記入して、いっしょに持っていくこと。

### 【使用上の注意】

- ・歯根膜を損傷するおそれがあるので、抜けた歯の根の部分には触れないでください。
- ・容器のふたは、使用直前に開けてください。
- ・容器には本人以外の歯を入れないでください。
- ・抜けた歯を入れた容器は、できるだけ揺らしたり衝撃を与えたりしないでください。
- ・本品は4℃で24時間、歯を保存できることが確認されていますが、できるだけ早く歯科医院へ行ってください。
- ・再植した歯は最良の治療を行っても失われる場合があります。
- ・本品は無害ですが、飲用しないでください。
- ・一度開封されたものは無菌性が損なわれているので、使用しないでください。
- ・使用期限（外箱、容器底部に記載）の過ぎたものは使用しないでください。
- ・本品はまれに結晶が析出することがありますが、品質には影響ありません。

用途	ケガで抜けた歯の保存	保管方法	室温（1～30℃）
成分	塩化カリウム、塩化マグネシウム、硫酸マグネシウム、塩化カルシウム、その他	使用期限	外箱、容器底部に記載
		内容量	40mL（滅菌済）

### 【状況カード】

氏名	歯を保存液に入れるまでの時間	抜けた歯が落ちた場所（路上、グラウンド、床等）
日時 月 日 午前 午後 時 分		

\*本人の歯であることを確認すること。



ネオ製薬工業株式会社

〒150-0012 東京都渋谷区広尾3-1-3  
電話 03-3400-3768