


セティルザイム フォーム 2

Cetyl-Zyme Foam 2

Protease-Amylase
Dual Enzymatic Detergent

器具もふんわり泡で洗う

泡

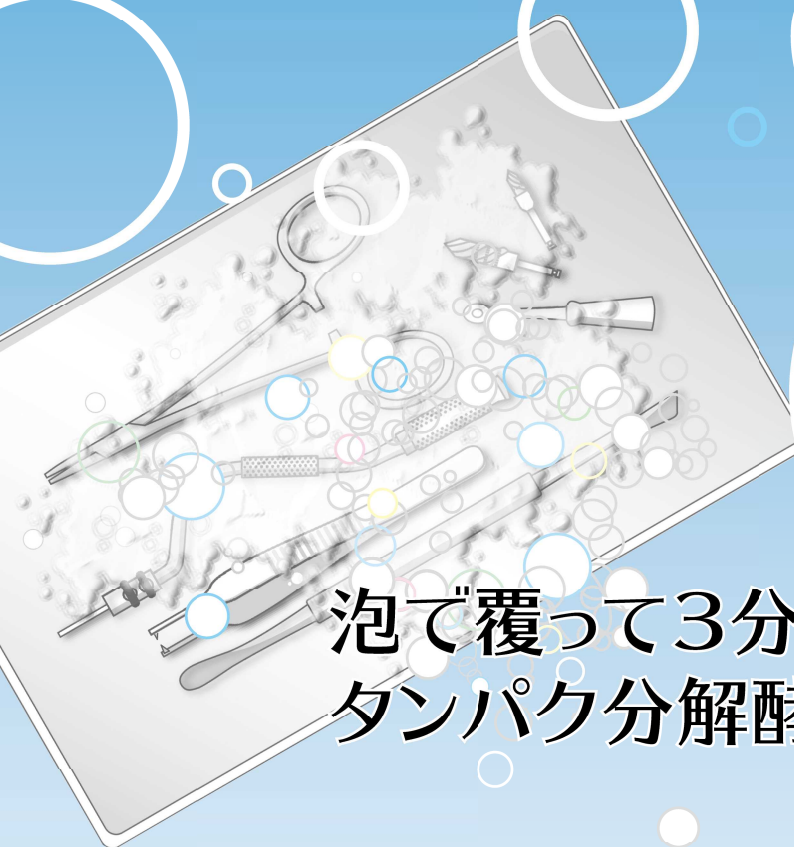

泡で覆って3分放置
タンパク分解酵素配合

セティルザイム フォーム 2

酵素系洗浄剤(泡タイプ)

インスツルメントなどに付着した汚れを溶解除去する泡タイプの洗浄剤です。泡の状態が長続きするので、「後からまとめ洗い」など多岐にわたるシチュエーションで活躍します。環境だけでなく、素材にも優しい酵素系です、布から金属まで幅広くお使い頂けます。

対 象 金属、ゴム、プラスチック、布など

用 途 体液、血液などによる汚れの溶解除去



NEO DENTAL CHEMICAL
PRODUCTS CO., LTD.

Cetyl-Zyme Foam 2

セティルザイム フォーム 2

使用方法

施術中または直後

汚れたインスツルメントを泡で覆います

！ 少し強めにトリガーを引くと液だれせず、キレイに泡立ちます。

洗浄・消毒エリア

器具には触れず、汚れが分解除去されるまで、泡で覆われた状態で放置して下さい

チェアサイド

！ 洗浄時間は3分程度が目安です。汚れのひどい場合や、気温(液温)の低い時は適宜延長して下さい。「後からまとめ洗い」などで長時間洗浄する場合も半日(6時間)程度を上限として下さい。※1)

水洗し、泡と分解された汚れを洗い流して下さい

忙しい時はそのままにして、「後からまとめ洗い」も可能です

！ 泡洗浄により、切創事故や飛沫による感染リスクは低減していますが、ゴム手袋、保護メガネ等必要な防護策を施して下さい。※2)


最終処理

滅菌等必要な最終処理を行います※

Dual Enzymatic Detergent
Protease-Amylase

※1) 非腐蝕性(中性)の液性により、錆の発生は抑えられていますが、防錆剤は配合されていませんので、極端に長時間の洗浄は避け下さい。
※2) セティルザイムによる泡洗浄は感染を起こしにくいレベルまで汚染を除去しますが、消毒滅菌に代わるものではありません。

比較試験

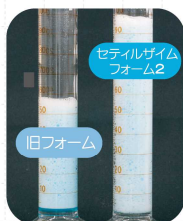

<起泡性>

タイプ2は起泡性と泡持続時間とも旧タイプの2倍程度の性能を有します。

(社内データ・測定時室温23.1℃)

※十分な泡立ちを得るためには少し強めにトリガーをお引き下さい。

※起泡性、泡持続時間は環境温度や対象物の汚れ具合によって変動します。



<泡持続性>

仕様・注意

- 容 量：680g
- 組 成：プロテアーゼ・アミラーゼ・界面活性剤
- 液 性：中性・無リン
- 注 意：
 - ・塗装面等は目立たない部分でシミ、変色がないことを確認してから使用すること。
 - ・30℃を超えない場所で保管すること。
 - ・目に入った場合には、すぐに多量の水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。
 - ・万一飲み込んだ場合には、多量の水又は牛乳を飲ませ、無理に吐かせないで医師の診断を受けさせること。

ネオ製薬ホームページ 最新の製品情報を掲載 <https://www.neo-dental.com/>



ネオ製薬工業株式会社

〒150-0012 東京都渋谷区広尾3丁目1番3号
Tel. (03) 3400-3768 (代) Fax. (03) 3499-0613

お問い合わせ ☎ 0120-07-3768