

使用機会の増えたソフトリラインに補修可能な安心感を

Evatouch[®] Super Set EX

義歯床用長期弾性裏装材

エヴァタッチ[®] スーパー セット EX

Reline + Repair

デンチャー用

シリコーン系ソフトリライン

補修可能

innovation



シリコーンの盛り足し、補修が可能なエヴァタッチスーパーは、
アフターケアに安心感があるだけでなく、
作業工程の多い間接法でもやり直しを気にせずご使用頂けます。

特定保険医療材料区分
義歯床用軟質裏装材(1)シリコーン系



NEO DENTAL CHEMICAL
PRODUCTS CO., LTD.

Evatouch[®] Super^{Set} EX 補修可能

エヴァタッチ[®]スーパー セット EX



間接法にも修復可能で安心!

シリコン系弾性裏装材の優れた特性を十分にご活用頂けるソフトリラインです。シリコン修復材をご使用頂くことにより、アフターケアの安心感だけでなく、間接法作業途中の万一の気泡混入やベース不足にも対応可能です。



エヴァタッチスーパー裏装材の特長

- 疎水性シリコン** 吸水性のほとんど無い疎水性シリコンを採用した汚れに強い裏装材です。
- 優れた接着性** プライマーはレジン表面をシラン化することにより、強力な接着界面を提供します。
- 無味無臭無発熱** 硬化時の味、臭い、発熱がありません。
- 生体親和性** 人体に対し活性が極めて低いシリコン系です。
- マスキング効果** 適度な不透明性が硬化物内の微細な気泡を見えなくするマスキング効果があります。
- 適度な流動性** 口腔内温度により流動性が程よく変化し、必要な裏装厚さの確保が可能です。

お手入れの仕方

- ① 毎食後義歯をはずし、水洗いをする。
- ② 裏装材部分はスポンジやガーゼを使って優しく洗う。
- ③ 義歯洗浄剤に浸ける。
- ④ お口のお手入れをする。
- ⑤ 装着前に水洗いする。

1.94MPa
修復材接着性
シリコン修復材
Silicone Repair






図中では修復材を緑色で図示していますが、実際は裏装材に近似したレジン床色です。

修復材の色

シリコン修復材の特長


- シリコンを補修** シリコンの補修を初めて可能としたエヴァタッチスーパー専用の修復材です。
- 十分な耐久性** 修復材の引裂強度は10.6kN/mと十分な耐久性があります。
- スーパーソフト** ゴム硬度値は裏装材の約半分、この特性を利用し必要な部位のみをスーパーソフト化することも可能です。

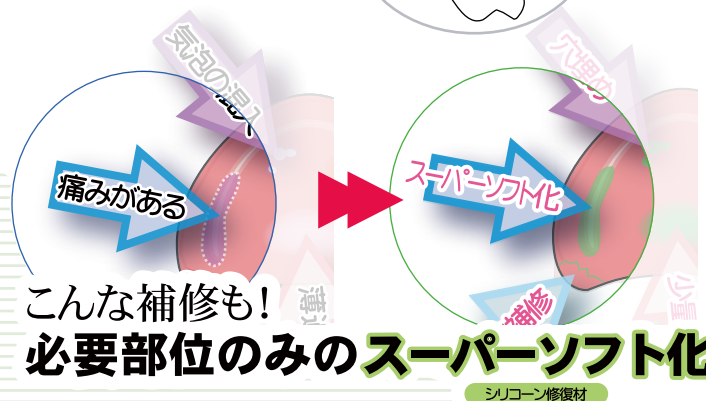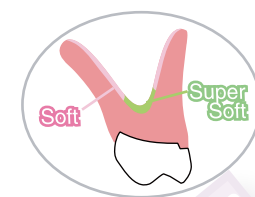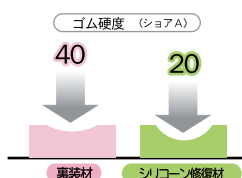

Reline+Repair

間接裏装法 Reline


- ▶ 診査
口腔内をチェックします。
- ▶ 咬座印象
通法に従い粘膜面の印象を採ります。

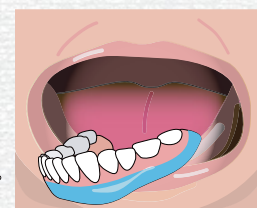

裏装のポイント

- ▶ 裏装部位は義歯床を一層切削し新鮮面を出す。
- ▶ プライマー塗布前は十分乾燥させる。
- ▶ 十分時間を置いてからトリミングを行う。
- ▶ 研磨材は境界部が剥がれない様、裏装材側から義歯床方向の回転で使用する。

- ▶ ボクシング
リライニングのため印象採取後、必要ときは、ボクシングを行い作業模型を作製します。

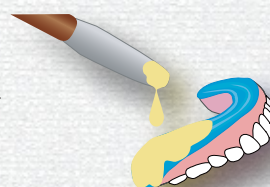

- ▶ 石膏模型製作及び咬合面コアの採得
咬合器下部に石膏コアを作製し、適宜分離材を塗布します。



- ▶ 印象材除去・切削
裏装厚の必要な部分を切削します。(削りすぎによる義歯の強度低下に注意して下さい。)




- ▶ プライマー塗布
塗布前に裏装部を十分乾燥し、床縁を越えてムラ無く均一にプライマーを塗り乾燥させます。(重ね塗り注意)



- ▶ 盛り付け
カートリッジを準備し、エヴァタッチスーパーを盛り付けます。(量が不足しないようにご注意下さい。)
操作可能時間は2分～2分30秒です。



- ▶ 圧接
咬合位置が変化しないように注意して圧接し、30分以上放置します。

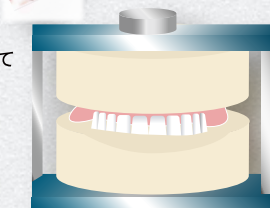


Point


- 保持時間を長くにとって頂くほど、接着性に好影響を与えます。
- ※ 図ではリライニング用咬合器を使っています。他の咬合器でも問題ありませんが、圧接時に咬合位置が変化しないようにご注意下さい。



- ▶ トリミング
余剰部分を切り取ります。

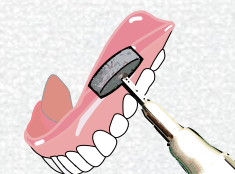

- ▶ 修正
義歯との移行部分を仕上げます。

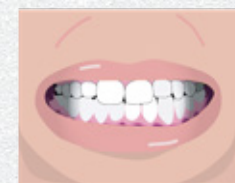


- ▶ 完成
試適し適宜修正を行います。

補修法 Repair

補修のポイント

- ▶ 補修部位の裏装材表面を粗く切削する。
- ▶ 補修部位は義歯床を一層切削し新鮮面を出す。
- ▶ プライマー塗布前は十分乾燥させる。
- ▶ 硬化完了まで圧接する。

修復部位断面

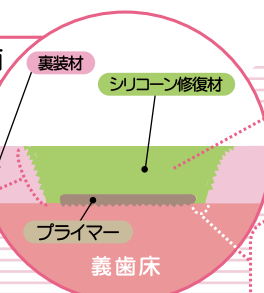

裏装材面は歯科用スチールバー等金属性切削具で新鮮面を出し、かつ面を粗くする。

修復材の硬化完了まで確実に圧接する。

プライマーは裏装材と接触しない様少しあけて義歯床面にのみ塗布する。

Evatouch[®] Super^{Set} EX



Evatouch® Super Set EX エヴァタッチ®スーパー セット EX

義歯床用長期弾性裏装材



エヴァタッチ®スーパー セット EX

内 容

エヴァタッチ スーパー		
裏装材	50g	1本
プライマー	10mL	1本
シリコン修復材	5g	1本
ネオ ミキシングチップ(S)		8本
エヴァポイント		1個
エヴァホイール		2個
プライマー塗布用筆		2本
スパチュラ		1本
練和紙		1冊
取扱説明書		

<エヴァタッチ スーパー セット>

管理医療機器

一般名称:

義歯床用長期弾性裏装材

医療機器認証番号:


219ADBZX00130000

別売单品



エヴァタッチ スーパー 裏装材 50g 1本

(医療機器認証番号: 21500BZZ00519000)

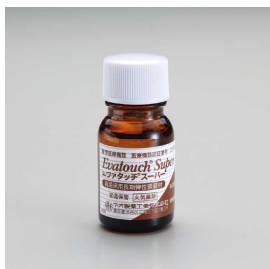

エヴァタッチ スーパー プライマー 10mL 1本

(医療機器認証番号: 21500BZZ00519000)



エヴァタッチ スーパー シリコン修復材 5g 1本

(医療機器認証番号: 21500BZZ00519000)



ネオ ミキシングチップ(S) 8本

(医療機器届出番号: 13B1X00154000031)



ネオ ディスペンサー 1個

(医療機器届出番号: 13B1X00154000030)



エヴァポイント 2個

(医療機器届出番号: 13B1X00154000025)



エヴァホイール 2個

(医療機器届出番号: 13B1X00154000026)



ネオ練和紙(S) 5冊



プライマー塗布用筆 2本

※シリコン修復材単品はエヴァタッチスーパー専用です。練和は添付のスパチュラをお使い下さい。

ご注意 使用に際しては添付文書及び取扱説明書をよくお読みください。

- ・接着させる面積が著しく小さくかつ遊離した部位を補修する場合は破損脱落の可能性があります。この場合当該部位のみで補修せず、ある程度の強度が確保可能な面積を削去して補修を行って下さい。
- ・確実な補修を行うために、補修部位の裏装面をスチールバー等で粗くし、レジン面は表面を一層削去して下さい。
- ・プライマーは水分の存在を嫌います。接着不良を避けるため、プライマー塗布前の乾燥は十分に行って下さい。
- ・また、プライマー塗布後の乾燥も十分行って下さい。
- ・シリコン修復材が本来の貼り合わせ強度を発揮するには、ある程度修復材自体の厚みが必要になります。特に貼り合わせ時には薄くなりやすいので、レジン床を削去するなどして修復材分の厚みの確保に留意して下さい。また圧接時にも、修復材が薄くなり過ぎないように注意して下さい。

- ・補修を確実にするため、硬化完了まで圧接を行って下さい。
- ・接着強度は十分にありますが、補修個所の界面はそれ以外の場所に比べ強度的には若干弱くなります。患者様には無理な力を加えないよう注意喚起をして頂きますとともに、補修後は早めの経過観察を行い、同部位の状態をチェックして下さい。
- ・使用中の義歯の場合、レジン床及び裏装材の状態により補修が困難なケースもあります。作業終了後は状態をよくご確認ください。
- ・修復材の色はエヴァタッチ スーパー裏装材に近似していますが、若干異なって見えます。補修部位の面積が広い場合や色調の統一感を重視する場合は、シリコン修復材を単独ではなく裏装材と併用してお使い頂くことをお勧めします。
- ・裏装材及び修復材の詳細な使用方法を記載したリーフレットがございます。下記フリーダイヤルまでご請求下さい。

ネオ製薬ホームページ 最新の製品情報を掲載 <https://www.neo-dental.com/>

製造販売業者



ネオ製薬工業株式会社

〒150-0012 東京都渋谷区広尾3丁目1番3号

Tel. (03) 3400-3768 (代) Fax. (03) 3499-0613

お問い合わせ ☎ 0120-07-3768

販売店名