

排唾管で根管乾燥!

Multi Suction E type

医療機器認証番号 219ADBZX00128000

管理医療機器



吸って乾燥 マルチサククション Eタイプ

根管吸引乾燥器具 排唾管接続タイプ <一般的名称: 汎用吸引用カテーテル>

排唾管に接続して根管を吸引乾燥するタイプのインストルメントです。完全な接続式のため、ワンハンドで安定した使用感が得られます。従来のペーパーポイントによる根管乾燥方式に比べ、早く、確実で、通常1根管あたり数秒で根管乾燥が完了します。また、先端部分を含めて透明な構造のため、吸引状態を視認しながら確実な操作が可能です。


「出血のある症例での使用例」

Movie 45sec ▶



排唾管ホースとの結合に関して

排唾管アダプターはユニバーサルタイプとなっております。接続部の内径が5~6mmであれば大部分のユニットに適合致します。下図もご参照ください。

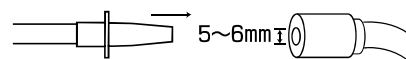


ゴム又はOリング式の嵌合部



確実に挿入

固定されていれば、少し隙間があっても支障ありません。

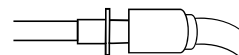

注意: キング工業(株)製の排唾管には適合致しません。それ以外のメーカーのユニットも接続部内径をご確認の上お求め下さい。




NEO DENTAL CHEMICAL
PRODUCTS CO., LTD.

Multi Suction E type


マルチサククション Eタイプ




完全接続式です
ワンハンドで安定した使用感が得られます。

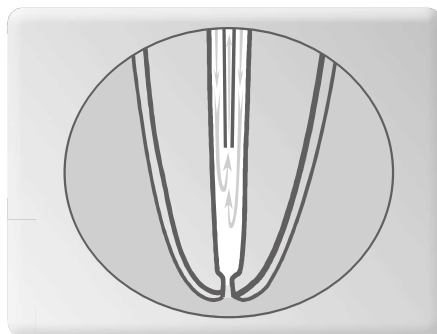

数秒で乾燥状態が得られます*
普通の根管サイズに対し、数秒で乾燥状態が得られる換気能力があります。最後にペーパーポイント等で確認し終了します。*注意: 根管の状態により異なります。

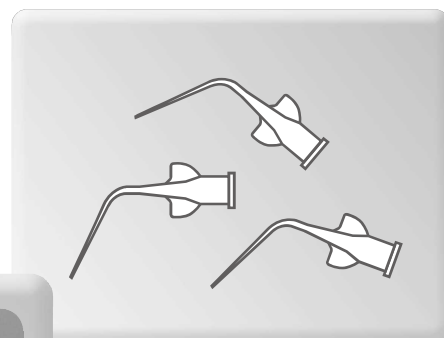

チップはディスポーザブルなので衛生的にお使い頂けます

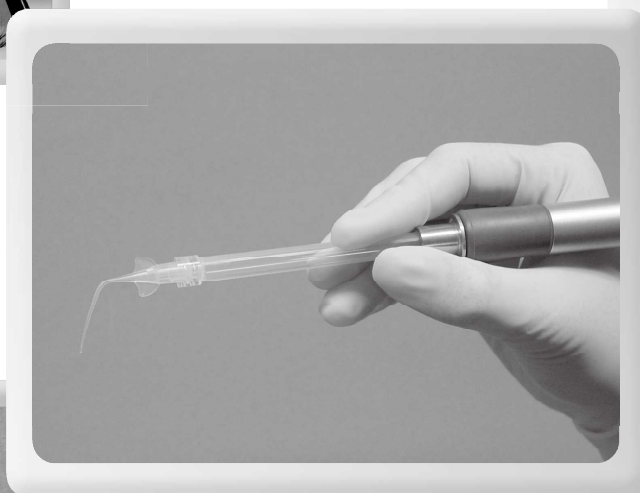

Eタイプは排唾管に接続する 根管吸引乾燥器です


洗浄後、貼薬前、根充前の吸引及び乾燥に使用します。

※単品のバキュームアダプタをお求めいただくと、バキュームを使つての吸引乾燥も可能です。



先端まで透明です

先端部まで透明なため、吸引状態を視認できます。

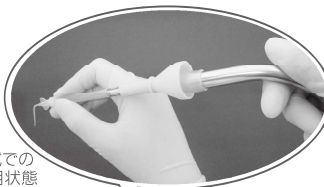

バキューム
押し当て方式での
使用状態

オートクレープで滅菌可能

マルチサククション本体部分は薬液消毒の他、オートクレープ滅菌も可能です。※

※樹脂部分は乾燥工程不可
※変形を避けるため、加熱滅菌時は必ず分解して下さい。

包装価格

名 称	包 装
セ ッ ト	マルチサククション Eタイプ セット
	× 2 個
	× 5 本
	× 20 本

名 称	包 装
排唾管アダプタ	× 1 個
バキュームアダプタ	× 2 個
本体シリンジ	× 10 本
ネオ クリアチップ(S) 医療機器届出番号 13B1X0015400010	× 40 本

ネオ製薬ホームページ 最新の製品情報を掲載 <https://www.neo-dental.com/>



ネオ製薬工業株式会社

〒150-0012 東京都渋谷区広尾3丁目1番3号
Tel. (03) 3400-3768 (代) Fax. (03) 3499-0613

お問い合わせ ☎ 0120-07-3768

販売店名