


ガッタパーチャに替わる新しいポイントです。

FlexPoint[®] NEO

フレックスポイント[®]「ネオ」

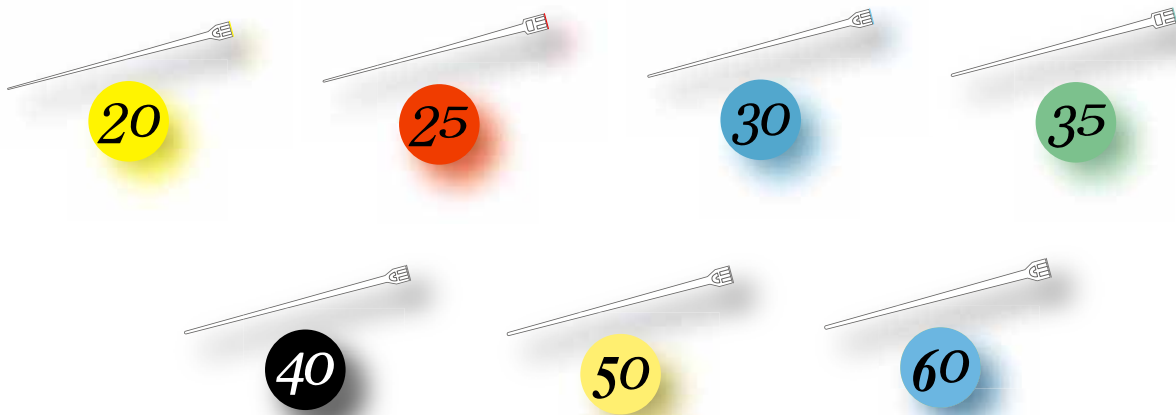

FlexPoint[®] NEO

歯科用根管充填ポイント
フレックスポイント[®]「ネオ」



NEO DENTAL CHEMICAL
PRODUCTS CO., LTD.

各10本入

Same
but
Different
Same


ガッタパーチャに替わる新しいポイントです。

ポリプロピレンの根管充填ポイント
FLEXPOINT® NEO

□ 保険診療対応。

加圧根管充填が算定頂けます。

□ マスターポイントとしてお使いください。

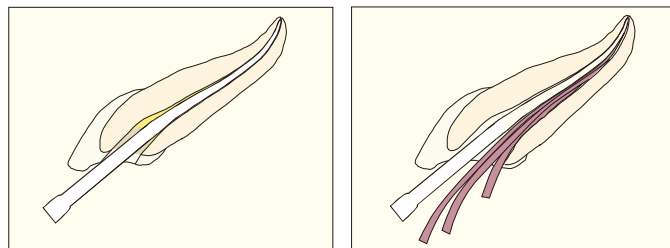


ラテラルコンデンスの場合、アクセサリポイントはガッタパーチャ製をお使い頂きます。

余剰部分は加熱したインストルメントでカットできます。この際、ガッタパーチャを切除するときより高めに加熱します。


※溶剤で軟化させることはできません。シーラー併用です。
※製品添付の取扱説明書をよく読みのうえご使用下さい。

□ 簡単に切削できます。

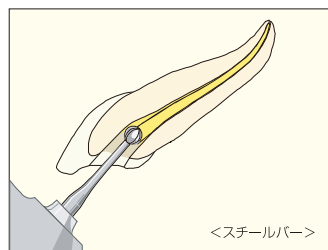

※シーラーが硬化して、確実にポイントが固定されたことを確認してから、作業して下さい。

□ ポイントの除去方法。

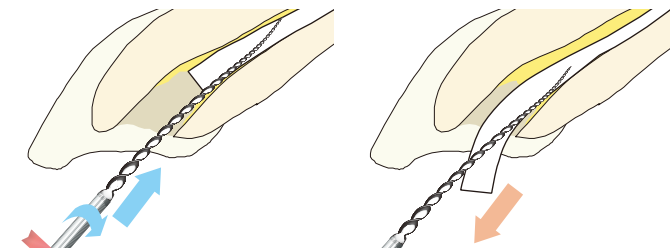

①周辺部あるいはポイントに直接切削器具を回転挿入する。
②引き抜き操作を行う。一塊もしくは切削片として除去される。

※軟化溶解材を使ってポイントを溶解することはできません。

□ 造影性があります。

X線造影性 6.6mm JIS (T6515)
サイズ 20 25 30 35 40 50 60

□ カラーコード付きです。

20 25 30 35 40 50 60 は国際規格に準拠したカラーコードが付いています。



FLEXPOINT® NEO

歯科用根管充填ポイント

医療機器認証番号 21300BZZ00184000

フレックスポイント®「ネオ」

管理医療機器

組 成 ポリプロピレン／硫酸バリウム

包装価格 単 品 50本入 4,000円

セット 50本入 4,000円
#20・25・30・35・40各10本 入り(#50・60は単品包装をご利用下さい。)

既発表文献 (2007年10月現在)

- 1) 佐藤穂子、橋本幸扶、森下浩江、佐々木重夫、天野義和：フレックスポイント®「ネオ」の湾曲根管に対する適合性：日歯保誌45 (2) 330-334・2002
- 2) 木瀬俊彦、大根光朝、山崎康夫、椎木一雄：ポリプロピレン製根管充填用ポイント“フレックスポイント®「ネオ」”の物性：歯科材料・器械Vol.19 Special36
- 3) 戸田忠夫：新しい根管充填材フレックスポイント®「ネオ」について：日本歯科評論695
- 4) 大根光朝、山崎康夫、椎木一雄：高分子材料からなる根管充填材の開発：1997日本臨床歯内療法学会抄録集
- 5) 山崎康夫、大根光朝、椎木一雄：高分子材料からなる根管充填材の開発2報：Polypropylene pointの臨床成績：第19回日本臨床歯内療法学会抄録集
- 6) 加藤広之：ポリプロピレン製根管充填用ポイントをコア・キャリアーに用いた加温軟化ガッタパーチャ充填法について：DENTAL DIAMOND26(8)94-96
- 7) 加藤広之、中川寛一：根管充填～根管閉塞技法の現状6.新しい加温軟化ガッタパーチャ充填法：FPコア・キャリアー法：歯科学報第103巻第6号
- 8) 佐藤穂子、五十畑正憲、佐々木重夫、天野義和：フレックスポイント®「ネオ」の親和性に

□ 根管長測定に応用できます。

X線による根管長測定では通常リーマー等を使用していますが、フレックスポイント「ネオ」を使用すると安全かつ確実に行えます。



<試適>



<試適X線>


- ついて：日歯保誌2001年秋季学会抄録集
- 9) 五十畑正憲、森下浩江、今井啓全、佐々木重夫、天野義和：固形根管充填材の吸水性について：日歯保誌2001年秋季学会抄録集
 - 10) 大根光朝、山崎康夫、椎木一雄：新・臨床に役立つ「すぐれモノ」フレックスポイント®「ネオ」ポリプロピレン製根管充填ポイント：DENTAL DIAMOND28(8)110-113
 - 11) 東泉、大住伴子、古賀裕紀子、宗洋一郎、黒木賀代子：根管充填用ポイントの消毒・滅菌に関する検討：日歯保誌47 (2) 314～318・2004
 - 12) Effects of Autoclaving on Dimensional Qualities and Physical Properties (Flexural Rigidity and Brittleness) of Newly Developed Root Canal Filling Point Made of Polypropylene (FLEX POINT NEO®): Mitsuasa Ohne and Yasuo Yamazaki : The Bulletin of Tokyo Dental College Vol.46 (No.1-2) 27-32・2005
 - 13) 戸田忠夫、畠銀一郎、村上伸也、鳥袋善夫、天野義和、五十畑正憲、久保田稔、川嶋敏宏、土倉康、伊藤彰人、中川寛一、龍崎直仁、平井義人：ポリプロピレン製ポイントを用いる根管充填法の臨床経過：日歯保誌48 (5) 681～686・2005

Different


□ 生体親和性の良い材質です。

フレックスポイントの皮下埋入試験

兎背部の表皮下に#30のフレックスポイントとガッタパーチャポイントを4週間埋入
<組織像>

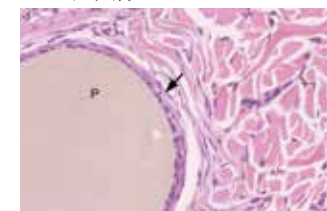

<フレックスポイント>

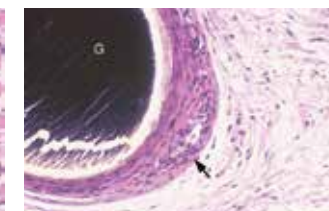


<ガッタパーチャポイント>

フレックスポイント「ネオ」の組織反応はガッタパーチャポイントより軽微であり、歯科材料としての組織為害性は問題ないと判断できる。

□ オートクレーブ滅菌に対応しています。



円筒容器ごとオートクレーブ滅菌できます。

※注意：温風乾燥は行わないで下さい。高温のため変形の原因になります。

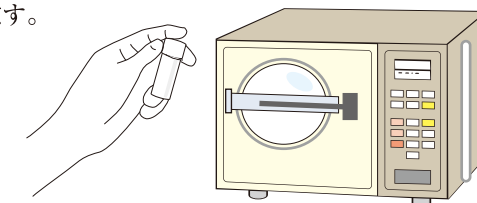


□ フレキシブル!

ガッタパーチャ製に比べコシが強く、柔軟性が高いため、細い根管への挿入が容易です。

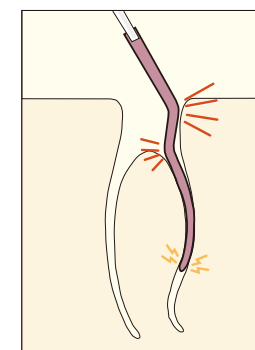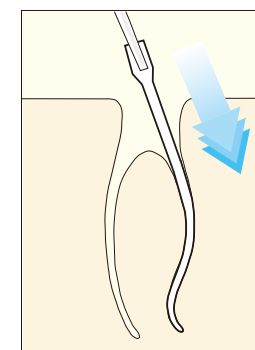

□ 均質です。

機械化された射出成形により、均質でサイズ精度の高い品質を確保しています。

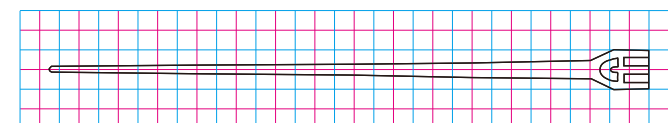

フレックスポイント®「ネオ」の臨床例

症例1

♀61Pul（近心根、1根、#25・遠心根、1根、#25）



術前



術後

症例2

♀61Pul（近心根、2根、#30・#30・遠心根、1根、#50）



術前



術後

症例3

♀71Per（近心根、2根、#50・#50・遠心根、1根、#70）



根充後



5.5ヶ月後

症例4

♀71Per（近心根、2根、#50・#50・遠心根、1根、#50）



根充後



4年後

		20
		25
		30
		35

		40
		50
		60

デンタリス®KEZ

医薬品含有歯科用根管充填シーラー



医療機器承認番号
21200BZZ00582000
高度管理医療機器

包装/標準価格

セット（粉末15g・液10ml・
粉末用スプーン・練和紙）
10,000 円

補充用

粉末15g 5,000 円
液10mL 5,000 円

デンタリス®NX

医薬品含有歯科用根管充填シーラー



医療機器承認番号
21300BZZ00237000
高度管理医療機器

包装/標準価格

セット（粉末15g・液10ml・
粉末用スプーン・練和紙）
10,000 円

補充用

粉末15g 5,000 円
液10mL 5,000 円

デンタリスシリーズは、水酸化カルシウムを配合したISO6876に適合する酸化亜鉛ユージノール系根管充填用シーラーで、根管壁及び根管充填用ポイントに対するヌレ性に優れています。水酸化カルシウムによりpHをアルカリ性に調整し、根管内で5～10分と短時間で硬化するため、組織に対する刺激性が少なく、速やかなポイント固定が可能で、ポリプロピレン製根管充填用ポイント「フレックスポイント「ネオ」」のシーラーにも適しています。

●デンタリスKEZ

デンタリスKEZは水酸化カルシウムとヨードホルムを配合しており、感染根管治療後の根管充填に良好な効果を発揮します。また、水酸化カルシウム・ヨードホルム糊材（ビタペックス等）と成分が近似しているので、ポイントと併用する同時積層根管充填法にも応用できます。

●デンタリスNX

デンタリスKEZの姉妹品でヨードホルムを配合していないため、においが少なくヨード過敏症の患者さんにも適しています。

※基本的に硬化するタイプのシーラー材であれば、使用可ですが、ポスト形成等ポイントに力の加わる処置をする際はシーラーの硬化が完了していることをご確認下さい。

ネオ製薬ホームページ 最新の製品情報を掲載 <http://www.neo-dental.com/>



ネオ製薬工業株式会社

〒150-0012 東京都渋谷区広尾3丁目1番3号
Tel. (03) 3400-3768 (代) Fax. (03) 3499-0613

お問い合わせ ☎ 0120-07-3768

販売店名